

Instrução de Uso – Registro ANVISA 10216839002 : AGULHA INTRODUTORA P/ FIO GUIA

Indicação:


A Agulha Introdutora é um dispositivo para punção subcutânea do paciente para introdução de fio guia em procedimentos arteriais e/ou venosos; O produto é composto por um hub de conexão luer lock fêmea na parte proximal, corpo fabricado em modelo “parede fina” com bisel trifacetado na parte distal e bainha protetora do corpo da agulha para prevenção de eventuais acidentes perfuro- cortantes.

Apresentação:

A Agulha Introdutora é fornecida individualmente, embalada em filme plástico e papel Tyvek. Esterilizado utilizando Óxido de Etileno.

Composição:

Componentes :	Materiais :
(1) Hub Luer Lock	Policarbonato
(2) Corpo da Agulha	Aço Inoxidável - SUS 304
(3) Bainha Protetora	Polietileno de alta densidade

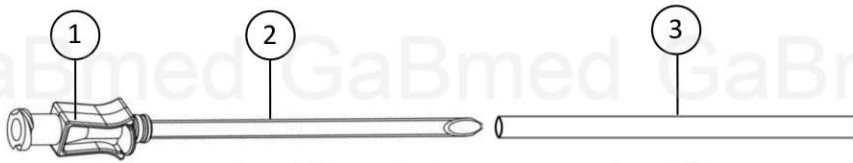

Tamanhos :

- 18ga x 70mm (adulto)
- 21ga x 40mm (pediátrico)

Precauções:

- Conteúdo estéril e apirogênico, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada.
- Somente para uso único. Descarte após o uso. Não reutilizar.
- O uso deste produto é restrito ao médico ou profissional qualificado
- Leia as instruções de uso antes de utilizar o produto. Somente utilizar seguindo as instruções.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais consequências resultantes do uso impróprio.
- O produto deve ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem.
- O produto deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.
- Observar os procedimentos de controle de infecção apropriados e substituir o produto conforme prática da instituição.
- O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C. Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte, destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem para que sua embalagem permaneça intacta, mantendo assim sua esterilidade. Transporte e/ou manuseio impróprios podem causar danos estruturais e funcionais ao produto.

Contraindicações:

- Não se conhece contra indicações para este produto.

Instrução de Uso:

1. Usando técnica asséptica, retirar o produto da embalagem;
2. Retirar a bainha protetora do corpo da agulha para iniciar a punção;
3. Puncionar a pele do paciente na região do corpo definida pelo profissional qualificado;
4. Realizada a punção, introduzir o fio guia pela parte interna do corpo da agulha;
5. Em se progredindo o fio guia até o local desejado, retirar a agulha por sobre o fio guia e descartar;
6. Seguir com o procedimento escolhido;

Produto Estéril de Uso Único - Esterilizado utilizando Óxido de Etileno - Látex Free - Manter o produto afastado de luz solar
Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilização / Data de Validade / Lote / Registro ANVISA : ver rótulo
Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda.

Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente : (11) 5183-3078 – CNPJ : 68.867.522/0001-29
Responsável Técnica : Perla F. Fonseca / Coren SP : 202483 - www.gabmed.com.br - Indústria Brasileira.