

Instrução de Uso: DISTRIBUIDOR TORNEIRA VALVULADA

REGISTRO ANVISA 10216830037

Indicação:

O Distribuidor Torneira Valvulado GaBmed é indicado para ser conectado aos equipamentos de administração IV, cateteres e transdutores, para monitoramento da P.V.C (Pressão Venosa Central) através do controle do fluxo de líquidos.

Apresentação:

O Distribuidor Torneira Valvulado GaBmed é fornecido individualmente, embalado em filme plástico e papel grau cirúrgico.

Esterilizado utilizando Oxido de Etileno.

Produto Descartável de uso único.

Nas seguintes configurações:

- 1 Torneira
- 2 Torneiras interligadas
- 3 Torneiras interligadas
- 4 Torneiras interligadas
- 5 Torneiras interligadas

Composição:

Componentes :	Materiais :
(1) Corpo da Torneira	Polycarbonato
(2) Aleta da Torneira	Polietileno de alta densidade
(3) Válvula	Silicone
(4) Tampa protetora	Polietileno de alta densidade

Precauções:

- Conteúdo estéril e apirrogênico, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada.
- Somente para uso único. Descarte após o uso.
- O uso deste produto é restrito ao médico ou profissional qualificado.
- Leia as instruções antes de usar. Somente usar de acordo com as instruções.
- O fabricante não se responsabiliza por eventuais consequências resultantes do uso impróprio.
- O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.
- O produto deve ser conservado em ambiente seco e arejado e não exposto ao sol.
- Este produto é compatível com soluções padrões IV, lipídios, sangue e hemoderivados.
- Observar os procedimentos de controle de infecção apropriados e substituir o produto conforme prática da instituição.
- Transporte ou manuseio impróprio pode causar danos estruturais e funcionais ao produto.
- O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C. Os mesmos cuidados são válidos para o seu transporte, destacando-se a importância da aplicação de Boas Práticas de Armazenagem, para que sua embalagem permaneça intacta, mantendo assim, sua esterilidade.

Contraindicações: Não se conhece contraindicações para este produto.

Instrução de Uso:

1. Retire o Distribuidor Torneira Valvulado de sua embalagem em condições assépticas.
 2. Conecte o conector luer macho ao cateter que já está aplicado à artéria do paciente.
 3. O Conector luer fêmea fica livre para que o profissional conecte seringas ou equipamentos para realizarem a perfusão que considerem necessárias.
 4. Para que possa ocorrer a perfusão, é só virar a chave para liberar a passagem ou passagens para os medicamentos. A torneira de 03 vias valvulada é de uso único, leve e compacta. É fornecido em 5 modelos: com 1,2,3,4 ou 5 torneiras de 03 vias valvuladas interligadas.
- Os modelos com 2 ou mais torneiras apresentam na extremidade esquerda um conector luer lock fêmea e na extremidade direita um conector Luer Lock Macho.

Regulatórios:

- Biocompatibilidade conforme norma ABNT NBR ISO - 10993.
- Produção em sala controlada conforme norma ABNT NBR ISO-14644 grau "D".
- Conexões Luer Lock conforme norma ABNT NBR ISO - 594.
- Esterilização em Óxido de Etileno conforme norma ABNT NBR ISO - 11135.

Rastreabilidade:

Todas as movimentações de estoque, entradas e saídas, são registradas em sistema através do número do lote que relaciona o ciclo de vida do produto na GaBmed. Através do sistema de rastreabilidade que é feita pelo número de lote é possível localizar:

- Código do produto.
- Registros de Entrada: NF; data de entrada; quantidade de peças.
- Peças em Estoque.
- Registros de Saída: NF; cliente; data de saída: quantidade de peças.

O sistema de rastreabilidade também pode ser feito através de relatórios em sistema:

- PA: mostra todos os lotes de produto acabado que consumiram determinados lotes de matéria prima.
- MP: mostra todos os lotes de matéria prima que compõem determinado lote de produto acabado.

Instrução de Uso: DISTRIBUIDOR TORNEIRA VALVULADA
REGISTRO ANVISA 10216830037

Produto Estéril de Uso Único - Esterilizado utilizando Óxido de Etileno - Látex Free - Manter o produto afastado de luz solar.

Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilização / Data de Validade/ Lote / Registro ANVISA: ver rótulo.

Produzido e distribuído por GaBmed Produtos Específicos Ltda.

Rua Antônio das Chagas, 966 - 04714-001 – São Paulo – SP – Atendimento ao Cliente: (11) 5183-3078 - CNPJ: 68.867.522/0001-29.

Responsável Técnica: Perla F. Fonseca / COREN - SP: 202483 - www.gabmed.com.br - Indústria Brasileira.